

# COLDISEPT

## NANO SILVER

### Picături pentru urechi



Un dispozitiv medical sub formă de picături pentru urechi utilizat pentru a susține tratamentul inflamației canalului auditiv extern, inflamație rezultată din infecții bacteriene și fungice.

COLDISEPT nanoSILVER picături pentru urechi este destinat administrării pe canalul auditiv extern pentru a înmuia și îndepărta orice impurități și pentru a crea o barieră de protecție pe suprafața pielii. Produsul conține nanoparticule de argint și cupru care limitează creșterea bacteriilor și a ciupercilor. COLDISEPT nanoSILVER picături pentru urechi susține tratamentul inflamațiilor urechii externe de diferite etiologii.

#### COMPOZIȚIE

Apă purificată, glicerină, propilen glicol, argint nanocoloid, cupru nanocoloid.

#### EFECTE SECUNDARE

Efectele secundare ale COLDISEPT nanoSILVER picături pentru urechi, nu sunt cunoscute, cu toate acestea, la persoanele deosebit de sensibile, simptomele alergice nu pot fi excluse. Dacă apare o reacție alergică, opriți utilizarea produsului.

#### INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI PRECAUȚII

Nu utilizați produsul dacă sunteți alergic la oricare dintre ingrediente.

Nu utilizați produsul dacă timpanul este perforat.

Nu introduceți dozatorul prea adânc în canalul urechii.

Preveniți contactul accidental cu ochii și gura.

Opriți utilizarea produsului în caz de simptome alarmante.

A nu se utiliza după data de expirare!

Femeile însărcinate și copiii cu vârsta sub 6 ani pot utiliza produsul numai sub supraveghere medicală.

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din țara de reședință a pacientului.

Autoritate Nationala Competenta: Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478-RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro

## UTILIZARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Utilizați COLDISEPT nanoSILVER picături pentru urechi de trei ori pe zi, timp de cel puțin 3 zile după ce simptomele inflamației au dispărut.

Încălziți ușor flaconul (de preferință în mâini).

Întindeți-vă cu urechea orientată în sus.

Aplicați 5 picături (cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă recomandă altfel) și rămâneți în această poziție timp de 3-5 minute.







Folosiți sistematic, în funcție de nevoile individuale.

## CONDIȚII DE PĂSTRARE


A se păstra la o temperatură sub 25 °C, într-un loc uscat, nu lăsați la îndemâna copiilor.

Ambalaj 15 ml

## SEMNIFICATIA SIMBOLURILOR:

	LOT
	A se utiliza pana la
	A se citi instructiunile pentru utilizare
	Data fabricatiei
	Producător:
	Limita de temperatura pana la care poate fi expus in siguranta produsul

Data revizuirii textului: 01.09.2020

 ARKONA Laboratorium  
Farmakologii Stomatologicznej,  
Nasutów 99C, 21-025 Niemce,  
Polonia



Produs în UE pentru:

Alpen Pharma AG,  
Bern, Elveția

