

COLDISEPT

NANO SILVER Spray Nazal



Dispozitiv medical sub formă de spray, elimină senzația de uscăciune și iritare a mucoasei nazale, protejând în același timp împotriva factorilor nocivi externi.

COLDISEPT nanoSILVER Spray nazal hidratează și calmează mucoasa nazală, susținând în același timp regenerarea acesteia și eliminând senzația de arsură.

Produsul conține nanoparticule de argint care limitează creșterea bacteriilor. Produsul creează un strat de gel care protejează împotriva bacteriilor și virusurilor și sprijină regenerarea membranelor mucoasei. Proprietățile preparatului sunt rezultatul acțiunii sărurilor minerale și a extractelor din plante.

COMPOZIȚIE

Apă purificată, argint nanocoloid, extract de *Chondrus crispus*, sorbitol, glicerină, săruri minerale (fosfat dihidrogen de potasiu, clorură de potasiu, clorură de sodiu, clorură de calciu hexahidrat, clorură de magneziu hexahidrat), benzoat de sodiu, acid citric.

INDICAȚII

Utilizați în toate cazurile de uscăciune și iritare a pasajului nazal, indiferent de cauză.

A se utiliza în special în caz de:

- rinită atrofică;
- rinită infecțioasă sau alergică;
- utilizare a medicamentelor care afectează epiteliul mucoasei nazale;
- sinuzită;
- poluare a aerului sau praf;
- temperaturi extreme;
- la pacienții vârstnici;
- uscăciune cauzată de încălzirea centrală sau de aerul condiționat;
- fumat.

EFECTE SECUNDARE

Efectele secundare ale sprayului nazal COLDISEPT nanoSILVER nu sunt cunoscute, cu toate acestea, la persoanele deosebit de sensibile, simptomele alergice nu pot fi excluse. Dacă apare o reacție alergică, opriți utilizarea produsului.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE ȘI PRECAUȚII

Nu utilizați produsul dacă sunteți alergic la oricare dintre ingrediente.

Nu utilizați produsul dacă sunteți alergic la argintul metalic.

Preveniți contactul accidental cu ochii.

Opriti utilizarea produsului în caz de simptome alarmante.

A nu se utiliza după data de expirare!

În caz de contaminare, îndepărtați aplicatorul, spălați-l și fierbeți-l sau clătiți-l bine cu apă clocotită.

Femeile gravide și copiii cu vârsta sub 6 ani pot utiliza produsul numai sub supraveghere medicală.

Produsul poate fi utilizat pe perioade lungi de timp, fără risc de dependență, efecte secundare sau complicații.

Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din țara de reședință a pacientului.

Autoritate Nationala Competenta: Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478-RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro

UTILIZARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Utilizați produsul de 3-4 ori pe zi, în funcție de nevoile individuale.

Apăsați dozatorul de mai multe ori înainte de prima utilizare.

Așezați aplicatorul în cavitatea nazală.







Aplicați 1-2 doze în fiecare nară.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

A se păstra la o temperatură sub 25 °C, într-un loc uscat, nu lăsați la îndemâna copiilor.

Ambalaj 20 ml

SEMNIFICATIA SIMBOLURILOR:

	LOT
	A se utiliza pana la
	A se citi instructiunile pentru utilizare
	Data fabricatiei
	Producător:
	Limita de temperatura pana la care poate fi expus in siguranta produsul

Data revizuirii textului: 01.09.2020